

## Οδηγίες χρήσης του επιθέματος

Το Actiν'M® είναι ένα αυτοκόλλητο επίθεμα σιλικόνης, το οποίο αποτελείται από ένα φιλμ πολυουραιθάνης και ένα λεπτό στρώμα γέλης σιλικόνης. Αυτά τα συστατικά επιλέχθηκαν λόγω της βιοσυμβατότητάς τους.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι εγγενείς ιδιότητες της γέλης σιλικόνης βελτιώνουν την εμφάνιση παλαιών και νέων ουλών.

Συγκεκριμένα ενδείκνυται:

- Για τη θεραπεία υπερτροφικών ή χηλοειδών παλιών ή νέων ουλών.
- Προληπτικά, σε κλειστές πληγές, για την αποφυγή της μετατροπής του σε χηλοειδείς ή υπερτροφικές ουλές.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Actiν'M® δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Σε ανοιχτές πληγές.
- Μουλιασμένο δέρμα.
- Εγκαύματα.
- Στο βλεννογόνο.

Σε περίπτωση δερματικής αντίδρασης, διακόψτε τη θεραπεία και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες έως σήμερα.

### ΟΗΓΙΕΣ

• Πριν τη χρήση, καθαρίστε και στεγνώστε διεξοδικά την ουλή.

- Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο επίθεμα από την ατομική του συσκευασία.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το σχήμα του επιθέματος κόβοντάς το. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκόλλητο επίθεμα καλύπτει πλήρως την ουλή και την περιοχή γύρω από αυτή (τουλάχιστον 1/2 cm σε κάθε πλευρά τη ουλή).

• Ξεκινήστε αφαιρώντας το προστατευτικό φιλμ από το επίθεμα, ενώ τοποθετείτε την αυτοκόλλητη πλευρά του επιθέματος στην αρχή της ουλής.

• Αφαιρέστε πολύ προσεκτικά το προστατευτικό φιλμ καθώς εφαρμόζετε το επίθεμα στην ουλή.

- Συνιστάται να καθαρίζετε και να

στεγνώνετε την ουλή με ουδέτερο σαπούνι μια φορά την ημέρα.

- Ιδανικά το επίθεμα θα πρέπει να παραμένει στην ουλή όλο το 24ωρο.

• Αλλάξτε το επίθεμα κάθε 3-5 μέρες όταν αυτό δεν μπορεί να παραμείνει πλέον κολλημένο στην ουλή. Μη φοράτε το ίδιο επίθεμα για παραπάνω από 7 μέρες.