

تعليمات الاستخدام للجل

مرهم جلدي ذو تركيبة متجانسة، وغير دهني، يحتوي على السيليكون الطبي الحديث. تم اختيار هذه المكونات لتوافقها **Activ'M Gel** الحيوي.
لعلاج وتقليل الندوب الضخامية والجزرية. كما أنه فعال عند وضعه على الندوب الجديدة والقديمة: كما أنه **Activ'M Gel** يستعمل يقلل آثار الجروح الجلدية بشكل واضح
:بطريقة فعالة من أجل **Activ'M Gel** يعمل
الوقاية
العلاج
بشكل خاص على الوجه وأماكن الانحناءات في الجسم، والمفاصل وكل مناطق الجسم التي يصعب وضع **Activ'M Gel** يُستعمل
ضمادات السيليكون عليها
سيشكل طبقة واقية ورقيقة وشفافة وحريرية الملمس **Activ'M Gel** بعد وضع

الخصائص

تعمل على تحسين شكل الندبات الجديدة والقديمة عن طريق **Activ'M Gel** الصفات الجوهرية لمرهم السيليكون
علاج الندبات الضخامية أو الجزرية الجديدة والقديمة-
وقاية الجروح المغلقة الناتجة عن جراحة أو حروق من الالتهابات -
لدى الأطفال **Activ'M Gel** يستعمل أيضاً

موانع الاستعمال

:في الحالات التالية **Activ'M Gel** لا ينبغي استخدام -
الجروح المفتوحة -
في حالة التعطين -
الحروق -
فوق الأغشية المخاطية -
وفي حالة وجود رد فعل جلدي غير مرغوب فيه، يجب التوقف فوراً عن العلاج واستشارة **Activ'M Gel** لا يجب استنشاق -
الطبيب المعالج

: الآثار الجانبية

لا توجد أي آثار جانبية حتى الآن

: إرشادات الاستعمال

قبل وضع المرهم، يُرجى تنظيف الندبة وتجفيفها
على الندبة مباشرة، واطرها بضع ثوان لتجف **Activ'M Gel** ضع كمية صغيرة من
يستعمل المرهم مرتين يوميًا
يجب إغلاق الأنبوب جيدًا بعد الاستعمال
يوصى بالاستمرار في استعمال المرهم لمدة شهرين إلى 4 أشهر
يمكن إزالة جزء من الطبقة الرقيقة الواقية للسيليكون إذا تم حك الجلد. وكلما بقيت طبقة رقيقة كافية على الندبة، فإنها ستترك بذلك أثرًا
حريريًا على سطح الجلد