

تعليمات الاستخدام للوصقة

٦٣١ءخي لوصقة سيبكون ذتية اللصق تتكون من فيلم يورثان وطفة رقيقة من هلام السيليكون الطي Activ'M
الحديث.
وقد تم اختيار هذه المكوتات وفقا لإمكانية تجانسها
طبي يع
:الحلمغ
الصفات الجوهرية لهلام السيبكون تعمل على تحسين شكل الندبات الجديدة والقديمة عن طريق: • لاج
الندباتء الضخامية والجدرية، الجديدة والقديمة
• وقاية الجروح المقلقة النايجة عن جراحة أو حروق من الاجاب و تكوت الندبات الضخامية
عواج٩لاسيالة
لا يتبتي استخدام 14تعهفي الحللات التالية
الجرج ادمج*
ى
فوق الأعشة الهاج
في حالة رد فعل جلدي غر مرغوي فيه. يب التوقق قورا عت العلاج واستشارة الطيدي المعالج أو أخصافي
الجلد
ارباتية5
لا توجد أي آثار جاتية
ارشفت لفعال
إزالة الضمادة الكيس. من لممكن تقطيعها للحصول على الحجم الني يقطي الندية أكلبا بما فيه ميطها
(على الأقل ءسممن جانبي الندية)
• البدء ي إزالة الفيلم الواق من اللوصقة ووضع الجاتي اللاصق من يداية تديق
• إزالة اباية يدقة أثناء تطبيق الضادة على الجرح
• ومن الموصي به تطيف وتجفيف الندية مرة واحدة في اليوم باستعال الصابوت الحايد
من الأحسن أن تترك اللوصقة فوق الجلد 24 ساعة في اليوم
• تغيير الضادة كل 53 أيام عندما لم تعد تمسك بما فيه الكفاية لا ترتدي تغس اللوصقة أكزمن 7 أيام