

# Gebrauchsanweisung

Activ'M Gel® ist ein nicht fettendes Mattierungsgel, das aus medizinischen Silikonen der neuesten Generation besteht. Diese wurden wegen ihrer Biokompatibilität ausgewählt.

Activ'M Gel® wird für die Behandlung von hypertrophen und Keloids-Narben und für die ästhetische Aufwertung Ihrer neuen oder alten Narben verwendet. Es reduziert sichtbar Ihre Narben.

Activ'M Gel® hat eine positive Wirkung

- indem es vorbeugt
- indem es zur Heilung beiträgt

Activ'M Gel® ist einfach und leicht aufzutragen. Es wird besonders im Gesicht, an Kniebeugen und Gelenken verwendet – an den Stellen, wo ein Silikonplaster schwer zu applizieren ist. Nach dem Auftragen bildet Activ'M Gel® eine dünne transparente und seidige Schutzfolie.

## INDIKATIONEN

Die inhärente Qualität des Silikongel Activ'M Gel® verbessert das Erscheinungsbild von Narben:

- Es begünstigt die Heilung von hypertrophen und Keloids-Narben, ob neu oder alt.
- Es wirkt vorbeugend bei geschlossenen Wunden nach Operationen oder Verbrennungen.

Activ'M Gel® kann bei Kindern verwendet werden.

## KONTRAINDIKATIONEN

Activ'M Gel® sollte in den folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Offene Wunden nach Operationen oder Verbrennungen.
- Bei einer Mazeration.
- Auf Schleimhäute oder in der Nähe der Augen.
- Activ'M Gel nicht einatmen oder einnehmen.

Bei Hautirritationen die Behandlung abbrechen und Ihren Arzt oder Spezialisten kontaktieren.

## NEBENWIRKUNGEN

Es sind derzeit keine Nebenwirkungen bekannt.

## ANWENDUNG

- Vor dem Auftragen die Narbe gründlich reinigen (mit einer neutralen Seife) und trocknen.
- Geben Sie eine kleine Menge Activ'M Gel® auf die Narbe und verteilen Sie es zu einer dünnen Schicht.
- 2 Mal täglich, morgens und abends auftragen.
- Schließen Sie die Tube nach dem Gebrauch.

Die empfohlene Mindestanwendungsdauer der Behandlung beträgt 2 bis 4 Monate. Die Behandlung kann bis zu einem Jahr verlängert werden.

Durch die Reibung kann ein Teil der Schutzschicht entfernt werden. Trotzdem befindet sich immer noch eine dünne Schicht aus Silikon auf der Narbe und hinterlässt einen seidigen Effekt auf der Oberfläche Ihrer Haut.