

Gebbruiksaanwijzing van de gel

Activ'M Gel® is een siliconegel met een mat effect die bestaat uit een nieuwe generatie van siliconen van medische klasse. Deze componenten werden geselecteerd voor hun biocompatibiliteit.

Activ'M Gel® wordt gebruikt bij de behandeling van hypertrofische en keloïdelittekens en bij esthetische verbetering. Hij vermindert uw littekens zichtbaar, of ze nu recent of oud zijn.

Activ'M Gel heeft de volgende gunstige effecten :

- Preventie
- Genezing

Activ'M Gel® wordt hoofdzakelijk gebruikt op het gezicht en in plooizones en op lichaamsgewrichten waar siliconeverbanden niet gemakkelijk kunnen aangebracht worden. Na het aanbrengen vormt Activ'M een beschermende en onzichtbare film op de huid.

TOEPASSINGEN

De intrinsieke kwaliteiten van de siliconegel Activ'M Gel® verbeteren het uitzicht van oude en nieuwe littekens.

- Ze behandelen hypertrofische of keloïdelittekens, of deze nu recent of oud zijn
- Ze voorkomen dat gesloten wonden hypertrofische of keloïdewonden worden (volgend op operaties of brandwonden).
- Activ'M Gel kan gebruikt worden op littekens bij kinderen.

CONTRA-INDICATIES

Activ'M Gel® kan niet gebruikt worden in de volgende gevallen:

- Open wonden (volgend op operaties of brandwonden),
- Maceratie,
- Slijmvliezen en in de buurt van de ogen
- Activ'M Gel® niet inademen of inslikken.

Staak bij geval van huidreacties de behandeling en raadpleeg een arts.

BIJWERKINGEN

Geen bekende bijwerkingen.

INSTRUCTIES

- Reinig en droog de wonde vóór gebruik grondig (met een neutrale zeep).
- Breng een kleine hoeveelheid Activ'M Gel® direct aan op het gebied met littekens. Laat enkele seconden drogen.
- Activ'M Gel® moet twee keer per dag aangebracht worden, 's ochtends en 's avonds.
- Doe de dop na gebruik voorzichtig weer op de tube.

Het wordt aanbevolen om minstens 2 à 4 maanden door te gaan met de behandeling. Behandeling kan verlengd worden tot maximum 1 jaar.

Door wrijving kan een deel van de beschermende siliconefilm verwijderd worden. Zolang er een kleine hoeveelheid van de siliconefilm op de huid blijft, zal deze zijdezacht aanvoelen.