

Hướng dẫn sử dụng gel

Activ'M Gel® là một loại gel silicon với hiệu ứng làm đều màu da, được cấu tạo bởi lớp silicon y tế. Các thành phần sản phẩm này được chọn do có tính tương thích sinh học. Activ'M Gel® được sử dụng trong điều trị sẹo phì đại và sẹo lồi; cải thiện thẩm mỹ: làm giảm rõ rệt các vết sẹo mới hoặc cũ.

Activ'M Gel® có công dụng:

- Phòng ngừa sẹo
- Chữa lành sẹo

Activ'M Gel® được sử dụng chủ yếu trên mặt, các vùng uốn cong và vùng khớp trên cơ thể nơi khó thoa bằng silicon. Sau khi thoa, Activ'M Gel® tạo thành một lớp màng bảo vệ trong suốt trên da.

CÔNG DỤNG

Nhờ đặc tính nội tại của gel silicon, Activ'M Gel® giúp cải thiện diện mạo của cả sẹo cũ và sẹo mới.

- Cải thiện sẹo phì đại hoặc sẹo lồi, dù là sẹo mới hay cũ.
- Ngăn ngừa vết thương kín trở thành sẹo lồi hoặc sẹo đại (sau phẫu thuật, đẻ mổ hoặc bị bỏng).
- Activ'M Gel® có thể được sử dụng để trị sẹo cho trẻ em.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Activ'M Gel® không được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Vết thương hở (sau phẫu thuật, bị bỏng),
- Sau khi da ngâm nước,
- Vết thương bị viêm mào và gần vị trí mắt,
- Không được hít hoặc nuốt Activ'M Gel®.

Trong trường hợp có phản ứng trên da, ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo kiến bác sĩ.

TÁC DỤNG PHỤ

Không có tác dụng phụ được biết đến.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch và lau khô vết sẹo trước khi bôi gel (sử dụng xà phòng trung tính).
- Bôi một lượng nhỏ Activ'M Gel® trực tiếp lên vùng bị sẹo. Để khô trong vài giây.
- Activ'M Gel® hai lần mỗi ngày - sáng và tối.
- Đậy nắp cẩn thận ống thuốc sau khi sử dụng.

Khuyến cáo nên sử dụng gel tối thiểu từ 2 đến 4 tháng. Thời gian điều trị có thể kéo dài đến 1 năm.

Khi có ma sát, một phần của màng bảo vệ silicone có thể bị mất đi. Chỉ cần một lượng nhỏ màng silicone vẫn còn trên da, da sẽ có cảm giác mượt mà.