

Instrucciones de uso del parche

Activ'M© es un apósito autoadhesivo compuesto de un gel de silicona. Estos componentes han sido seleccionados por su bio compatibilidad.

INDICACIONES

Las propiedades intrínsecas del gel de silicona mejoran el aspecto de cicatrices antiguas o recientes.

- Para curar cicatrices recientes.
- Para prevenir que heridas cerradas formen queloides.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se conoce ningún efecto secundario hasta la fecha.

CONTRAINDICACIONES

Activ'M no debe usarse en los siguientes casos:

- Herida abierta
- Exudación
- Quemadura
- Mucosa

En caso de reacción cutánea, interrumpa el tratamiento y consulte con su médico.

MODO DE APLICACIÓN

- Antes de utilizarlo, limpie y seque la cicatriz con cuidado.
- Saque el apósito de su envoltorio. Puede cortarlo y adaptarlo a la dimensión de la cicatriz. Asegúrese de que el apósito cubre toda la superficie de la cicatriz, incluyendo los bordes de esta (al menos 0,5 centímetros alrededor de la cicatriz).
- Retire la película protectora del apósito y coloque la parte adhesiva al comienzo de la cicatriz.
- Retire con mucho cuidado la película protectora aplicando el apósito en la cicatriz.
- En determinados tipos de piel se puede dar el caso que el apósito no se adhiera de forma correcta, en estos casos excepcionales, recomendamos colocar un esparadrapo hipoalérgico sobre el apósito para fijarlo a la piel.
- Se recomienda limpiar y secar la cicatriz una vez al día con jabón neutro.
- Se recomienda llevar el apósito las 24h del día.
- Cambiar el apósito cada 3-5 días cuando la adherencia de este disminuya. No debe llevar el mismo apósito más de 7 días seguidos.