

Instruções de uso do adesivo

O Activ'M© é um curativo autoaderente de silicone feito de uma película de poliuretano e uma fina camada de gel de silicone.

Estes componentes são selecionados pela sua biocompatibilidade.

UTILIZAÇÕES

As vantagens intrínsecas do gel de silicone melhoram o aspeto de cicatrizes antigas e recentes.

- Para reduzir o aspeto de cicatrizes hipertróficas ou queloides, antigas ou recentes
- Para evitar que as feridas fechadas se tornem cicatrizes queloides ou hipertróficas.

CONTRAINDICAÇÕES

O Activ'M© não pode ser utilizado nos seguintes casos:

- feridas abertas,
- maceração,
- queimaduras,
- mucosa,

Em caso de reação cutânea, parar o tratamento e consultar o médico.

EFEITOS SECUNDÁRIOS

Não se conhecem efeitos secundários até à data.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de usar, limpar e secar bem a cicatriz.
- Retirar o curativo da embalagem individual. O curativo pode ser cortado. Certifique-se de que o curativo cobre completamente toda a cicatriz, bem como a área circundante (pelo menos ½ cm em todos os lados da cicatriz).
- Começar por retirar a película protetora do curativo e colocar o lado adesivo na borda da cicatriz.
- O ideal é limpar e secar a cicatriz uma vez por dia com um sabão neutro.
- O curativo deve ser usado durante 24 horas por dia.

Mudar o curativo a cada 3 a 5 dias quando já não colar. Não usar o mesmo curativo durante mais de 7 dias.