

Istruzioni per l'uso del cerotto

Activ'M© è un cerotto in silicone realizzato in gel di silicone.

I suoi componenti sono stati selezionati nel rispetto della loro biocompatibilità.

INDICAZIONI

Le qualità intrinseche del gel di silicone migliorano l'aspetto di cicatrici vecchie o recenti:

- con effetto curativo per le cicatrici ipertrofiche e cheloidi vecchi o recenti.
- con effetto preventivo per ferite, formazione di cicatrici cheloidi e ipertrofiche.

CONTROINDICAZIONI

Activ'M© non deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- ferita aperta
- macerazione
- bruciatura
- su mucose.

In caso di reazione cutanea, interrompere la cura e consultare il proprio medico.

EFFETTI COLLATERALI

Nessun effetto collaterale a tutt'oggi è noto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Prima di ogni utilizzo pulire bene la cicatrice e lasciarla asciugare.
- Estrarre il cerotto dalla sua protezione individuale. Il cerotto può essere tagliato. Assicurarsi che il cerotto ricopra tutta la cicatrice così come tutto il bordo da una parte all'altra della cicatrice).
 - Iniziare a togliere la pellicola di protezione del cerotto e posizionare la parte adesiva sulla parte iniziale della cicatrice.
 - Togliere molto delicatamente la protezione applicando il cerotto sulla cicatrice.
 - Si consiglia di pulire la cicatrice e lasciarla asciugare una volta al giorno con del sapone neutro.
 - Il cerotto va idealmente portato 24 ore al giorno.

Cambiare il cerotto ogni 3-5 giorni quando non aderisce più. Non tenere lo stesso cerotto per più di 7 giorni.