

## জেলের ব্যবহার নির্দেশনা

অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) হল ম্যাট ইফেক্ট যুক্ত একটি সিলিকন জেল, যা একটি নতুন প্রজন্মের মেডিকেল-গ্রেড সিলিকন দ্বারা তৈরী। এই উপাদানগুলি তাদের জৈব সামঞ্জস্যতার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) হাইপারট্রফিক এবং কেলোয়েড দাগের চিকিৎসায় এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত হয়: এটি আপনার দাগকে দৃশ্যত কমিয়ে দেয়, সেগুলি সাম্প্রতিক হোক অথবা পুরানো।

অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) এর নিম্নলিখিত উপকারী প্রভাব সমূহ রয়েছে:

- প্রতিরোধ
- নিরাময়

অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) প্রধানত মুখ এবং বাঁকা অংশ এবং শরীরের সন্ধি গুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে সিলিকন ড্রেসিং প্রয়োগ করা সহজ নয়। অ্যাক্টিভ'এম (Activ'M) প্রয়োগ করার পরে ত্বকে শুধুমাত্র একটি প্রতিরক্ষামূলক এবং অদৃশ্য ফিল্ম তৈরি করে।

ব্যবহারসমূহ

সিলিকন জেল অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) এর অন্তর্নিহিত গুণগুলি পুরানো এবং নতুন দাগের চেহারা ভালো করে।

- এগুলি হাইপারট্রফিক অথবা কেলোয়েড দাগ সারিয়ে তোলে, সাম্প্রতিক বা পুরানো হোক না কেন
- তারা সেরে যাওয়া ক্ষতগুলিকে কেলোয়েড বা হাইপারট্রফিক দাগ হতে বাধা দেয় (অস্ত্রোপচার অথবা পোড়া আঘাতের পরে)।
- অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) শিশুদের দাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিবন্ধকতা

অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:

- খোলা ক্ষত (অস্ত্রোপচার বা পোড়া আঘাতের পরে),
- ম্যাসারেশন,
- শ্লেষ্মা এবং চোখের কাছে,
- অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) শ্বাসের মাধ্যমে নেবেন না অথবা খাবেন না।  
ত্বকের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে, চিকিৎসা স্থগিত করুন এবং আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

গৌণ প্রতিক্রিয়া

কোন পরিচিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

দিকনির্দেশনা

- ব্যবহারের আগে, দাগের জায়গাটি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিন (একটি নিরাপদ সাবান ব্যবহার করে)।
- অল্প পরিমাণে অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) সরাসরি দাগযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করুন। কয়েক সেকেন্ড শুকানোর সুযোগ দিন।
- অ্যাক্টিভ'এম জেল (Activ'M Gel®) অবশ্যই প্রতিদিন দুই বার প্রয়োগ করতে হবে - সকালে এবং বিকেলে।
- ব্যবহারের পরে সাবধানে টিউবের উপরে উপরে রাখুন।

অন্তত 2 থেকে 4 মাস চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। চিকিৎসা 1 বৎসর পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে

ঘর্ষণ দিয়ে, সিলিকন প্রতিরক্ষামূলক ফিল্মের একটি অংশ সরানো যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সূক্ষ্ম পরিমাণে সিলিকন ফিল্ম ত্বকে থাকে, আপনার ত্বকে একটি রেশমী অনুভূতি থাকে।