

প্যাচ ব্যবহারের নির্দেশনা

অ্যাক্টিভ'এম জেল* (Activ'M Gel*) © হল একটি সিলিকন স্ব-অনুগামী ড্রেসিং যা একটি পলিউরেথেন ফিল্ম এবং সিলিকন জেলের একটি সূক্ষ্ম স্তর দিয়ে তৈরি।
এই উপাদানগুলি কে তাদের জৈব জৈব সামঞ্জস্যতার জন্য নির্বাচিত হয়।

ব্যবহার

সিলিকন জেলের অভ্যন্তরীণ উপকারিতাগুলি পুরানো এবং নতুন দাগের চেহারা উন্নত করে।

- হাইপারট্রফিক বা কেলোয়েড পুরানো এবং নতুন দাগ নিরাময় করে
- বন্ধ ক্ষতগুলি কে কেলোয়েড বা হাইপারট্রফিক দাগ হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে।

প্রতিবন্ধকতা

অ্যাক্টিভ'এম জেল@ (Activ'M Gel@) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:

- খোলা ক্ষত,
- ম্যাসারেশন
- পোড়া,
- শ্লেষ্মা,

ত্বকের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে, চিকিৎসা স্থগিত করুন এবং আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তারিখ পর্যন্ত অজানা।

দিকনির্দেশনা

• ব্যবহারের আগে, দাগের জায়গাটি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিন
• তার পৃথক প্যাচ থেকে ড্রেসিং বার করে নিন। ড্রেসিং কে কেটে নেওয়া যেতে পারে। নিশ্চিত করুন যে ড্রেসিং উপযুক্তভাবে পুরো দাগের পাশাপাশি আশেপাশের জায়গাটিকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে (দাগের চারপাশে কমপক্ষে ½ সেমি)।

- ড্রেসিং থেকে প্রতিরক্ষামূলক ফিল্মটি সরিয়ে দিন এবং দাগের প্রান্তে আঠালো দিকটি রাখুন।
- আদর্শভাবে একটি নিরাপদ সাবান দিয়ে দিনে একবার দাগ পরিষ্কার করুন এবং শুকিয়ে নিন।
- ড্রেসিং দিনে 24 ঘন্টা পরা উচিত।

প্রতি 3 থেকে 5 দিনে ড্রেসিং পরিবর্তন করুন যতক্ষণ এটি আর না আটকায়। 7 দিনের বেশি একই ড্রেসিং পরবেন না