

## Instructions d'utilisation du Patch

Activ'M© est un pansement siliconé auto-adhésif composé d'un film polyuréthane et d'une fine couche de gel de silicone.

Ces composants ont été sélectionnés suivant leur biocompatibilité.

### INDICATIONS

Les qualités intrinsèques du gel de silicone améliorent l'aspect des cicatrices anciennes ou récentes :

- en curatif pour les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes anciennes ou récentes.
- en préventif pour les plaies fermées afin de prévenir la formation de cicatrices chéloïdes et hypertrophiques.

### CONTRE INDICATIONS

Activ'M© ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- plaie ouverte
- macération
- brûlure
- sur muqueuse.

En cas de réaction cutanée, interrompre le traitement et consulter votre médecin.

### EFFETS SECONDAIRES

Aucun effet secondaire n'est connu à ce jour.

### MODE D'APPLICATION

- Avant toute utilisation bien nettoyer et sécher la cicatrice.
- Oter le pansement de son sachet individuel. Il est possible de couper le pansement. S'assurer que le pansement recouvre toute la cicatrice ainsi que le pourtour de manière suffisante (au moins ½ cm de part et d'autre de la cicatrice).
- Commencer à enlever le film protecteur du pansement et positionner la face adhésive sur le début de la cicatrice.
- Retirer très délicatement le protecteur tout en appliquant le pansement sur la cicatrice.
- Il est recommandé de nettoyer et sécher une fois par jour au savon neutre la cicatrice.
- Le pansement est idéalement porté 24h par jour.
- Changer le pansement tous les 3-5 jours lorsque celui-ci n'adhère plus suffisamment. Ne pas porter un même pansement plus de 7 jours.