

Pleistro naudojimo instrukcijos

Activ'M© yra silikoninis lipnus tvarstis, pagamintas iš poliuretano plėvelės ir plono silikono gelio sluoksnio.

Šie komponentai yra parenkti pagal jų biologinį suderinamumą.

NAUDOJIMAS

Silikono gelio esminiai pranašumai pagerina senų ir naujų randų išvaizdą.

- Hipertrofiniams ar keloidiniams seniems ar naujiems randams gydyti
- Kad uždaros žaizdos netaptų keloidiniais ar hipertrofiniais randais.

KONTRAINDIKACIJOS

Activ'M© negalima naudoti esant:

- atviroms žaizdoms,
- maceravimui,
- nudegimams,
- gleivinei,

Atsiradus odos reakcijai, gydymą nutraukite ir kreipkitės į gydytoją.

ŠALUTINIAI EFEKTAI

Šalutiniai efektai iki šiol nėra žinomi.

INSTRUKCIJOS

- Prieš naudojimą nuvalykite ir gerai išdžiovinkite randą.
- Išimkite tvarstį iš atskiros pakuotės. Tvarstį galima perkirpti. Įsitinkite, kad tvarstis tinkamai ir pilnai padengia visą randą ir aplinkinę sritį (mažiausiai ½ cm visose rando pusėse).
- Pradėkite nuo tvarsčio nuimdami apsauginę plėvelę, o lipniąją pusę dėkite prie rando krašto.
- Idealiu atveju vieną kartą per dieną nuvalykite ir nusauskite randą neutraliu muilu.
- Tvarstį reikia nešioti 24 valandas per parą.

Tvarstį keiskite kas 3–5 dienas, kai jis nebelimpa. Nenaudokite to paties tvarsčio ilgiau nei 7 dienas.