

# Používateľská príručka gélu

Lipoelastic gél je silikónový gél s matným efektom. Tvorí ho nová generácia silikónov a jednotlivé komponenty tohto účinného gélu sú vybrané pre ich vysokú bio-kompatibilitu.

Lipoelastic gél je určený na redukciu a prevenciu vzniku keloidných a hypertrofických jaziev a na estetické zlepšenie vzhľadu jazvy. Pomáha redukovať zjazvené tkanivo, staré aj nové.

## **Aplikáciu Lipoelastic gélu:**

- Pomáhate predchádzať vzniku jaziev
- Redukujete vystúpené jazvy

Lipoelastic gél sa používa na jazvy, ktoré sa nachádzajú prevažne na tvári, v ohybových zónach a na kĺboch, teda v miestach, kde nie je možné použiť silikónové náplasti. Po aplikácii Lipoelastic gélu sa na pokožke vytvorí ochranný neviditeľný film.

## **POUŽITIE**

Výhodou silikónového Lipoelastic gélu sú jeho priaznivé účinky na vzhľad nových aj starých jaziev.

- Pomáha redukovať hypertrofické a keloidné, staré aj nové jazvy.
- Pôsobí preventívne proti tvorbe keloidných a hypertrofických jaziev po chirurgickom zákroku a pôsobí tiež na jazvy po popálení.
- Lipoelastic gél je možné aplikovať aj na jazvy u detí

## **KONTRAINDIKÁCIE**

Lipoelastic gél nepoužívajte:

- Na otvorené rany (po chirurgickom zákroku alebo po spáleninách)
- Na mokvajúce rany
- Na sliznice a v okolí očí
- Lipoelastic gél nikdy nevdychujte ani neprehltajte.

V prípade výskytu podráždenia pokožky prestaňte prípravok používať a poraďte sa so svojim lekárom.

## **MOŽNÉ NEŽIADÚCE ÚČINKY**

Nie sú známe žiadne nežiadúce účinky.

## **POKYNY PRE POUŽITIE**

- Pred nanesením Lipoelastic gélu jazvu dôkladne umyte (neutrálnym mydlom) a osušte.
- Aplikujte malé množstvo Lipoelastic gélu priamo na zjazvené tkanivo. Potom ošetrované miesto nechajte niekoľko sekúnd zaschnúť.
- Lipoelastic gél musí byť aplikovaný dvakrát denne – ráno a odpoľudní.
- Tubu Lipoelastic gélu po použití dôkladne zavrite.

Ošetrovanie jaziev pomocou silikónového gélu by malo trvať minimálne po dobu 2 až 4 mesiacov. Trením pokožky o oblečenie môže dochádzať k odlupovaniu ochrannej silikónovej vrstvy. Jemná vrstva gélu pokožku zjemňuje.