

Tapasz használati útmutató

Az Activ'M© öntapadó szilikon kötszer, amely poliuretán filmrétegből és finom szilikon gérrétegből áll. Ezeket az összetevőket nagyfokú bio-kompatibilitásuk alapján választották ki.

INDIKÁCIÓK

A szilikon gél jelentősen javítja mind a friss, mind a régi hegek kozmetikai állapotát.

- hipertrófiás, keloid heg kezelésére
- Hipertrófiás, keloid heg kialakulásának megelőzésére

KONTRAINDIKÁCIÓK

Az Activ'M© a következő esetekben nem használható:

- Nyílt sebekre
- Anyajegyekre
- Égésre
- Nyálkahártyára

Ha bármilyen bőrreakciót észlel, függesse fel a kezelést és forduljon orvoshoz.

Mellekhatások ezidáig nem ismeretesek.

HASZNÁLAT

- A kötszer használata előtt a heget alaposan tisztítsa meg és törölje szárazra.
- Vegye ki a kötszert a csomagolásból

és vágja megfelelő méretűre. Ügyeljen rá, hogy a kötszer a heget teljesen lefedje és minden oldalról legalább 1/2 cm-rel túlérje.

- Kezdje meg a védő eltávolítását és helyezze a kötszert öntapadós felével a hegre.
- A védőfólia fokozatos eltávolítása közben illessze a kötszert gondosan a hegre.
- A kötszert napi 24 órán át javasolt viselni.
- A napi tisztálkodás előtt távolítsa el a kötszert és mossa meg a heget langyos, semleges szappanos vízzel, majd öblítse le, törölje szárazra és helyezze vissza a kötszert.
- Ugyanaz a kötszer 3-5 napig viselhető, akkor kell kicserélni, amikor már nem tapad a bőrhöz.
- 7 nap elteltével mindenképpen új kötszer felhelyezése szükséges.