

## Yama kullanım talimatları

Activ'M©, poliüretan filminden ve ince bir silikon jel tabakasından oluşan ve kendiliginden yapışan bir silikon banttir. Bu bileşenler, biyolojik geçimlilikleri dolayısıyla seçilmiştir.

### KULLANIM ALANLARI

Silikonun yapısal avantajı sayesinde yeni ve eski yara izlerinin görünümünde iyileşme sağlar. Kapalı yaraların hipertrofik ve keloid yara izlerini iyileştirir. Kapalı yaranın keloid veya hipertrofik yara izine dönüşmesini önler.

### İKİNCİL ETKİLER

Yan etkileri halihazırda bilinmemektedir.

### KONTRENDİKASYONLAR

Aşağıdaki durumlarda Activ'M© kullanılamaz:

Açık yara,

Sızıntı,

Yanık,

Mukoza,

Cilt reaksiyonu oluşması halinde

tedaviyi kesin ve doktorunuza danışın.

### TALİMATLAR

Kullanım öncesinde yarayı temizleyin ve iyice kurumasını sağlayın.

Bandı tekli ambaljından çıkarın. Bandı istediğiniz biçimde kesebilirsiniz. Bandın yarayı ve çevresindeki alanı (yaranın çevresinde en az 1/2 cm'lik bir alanı) tamamen kapattığından emin olun.

Bant üzerindeki koruyucu filmi çıkartın ve yapışkan tarafı yara izinin bir ucuna yerleştirin.

Koruyucu filmi çok dikkatli bir şekilde çıkarırken, bandı yara izi üzerine uygulayın.

Yara izinin doğal bir sabunla günde

bir kez yıkanıp kurutulması tavsiye edilir.

Mümkünse, günde 24 saat bant uygulanması önerilir.

Bandı her 3-5 günde bir, yapışkanlığını kaybettiğçe değiştirin. Aynı bandı 7 günden fazla kullanmayın.